

Veloped®


Trionic Veloped

Veloped är unik i sitt slag, då den är utvecklad med gåendet i fokus och den underlättar avsevärt framkomligheten för dig som användare. Velopedens främsta egenskap är dess framhjul som har kapacitet att klättra över upp till 15 cm höga hinder (14" hjul), vilket är helt unikt.

Säkerhet


Det är förbjudet att stå på Velopeden samt att använda den för persontransport. När du sitter i den ska båda bromsarna vara låsta i parkeringsläge. Velopeden ska vara helt utfälld när du går med den.

Snabbguide

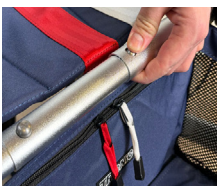

Hopfällning

- 1 Dra sitsen till det bakre läget.
- 2 Tryck in knappen till höger på teleskopstaget först.
- 3 Lyft och vik samtidigt den ena ramhalvan mot den andra.
- 4 Tryck in den andra knappen till vänster på teleskopstaget.
- 5 Lyft och vik samtidigt den ena ramhalvan mot den andra för att fälla ihop din Veloped helt.

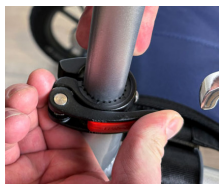

Inställning av greppbåge

- 1 Lossa båda snabbkopplingarna på greppbågen genom att vika dem bakåt. markeringarna tydligt och det är enkelt att justera höjden.
- 2 Justera greppbågen till önskad höjd, lämpligtvis till handledshöjd när du står bredvid Velopeden med armarna hängande längs kroppen. OBS: Enklast justerar du greppbågen sittandes på sittplatsen, då ser du siffer-
- 3 Lås greppbågen genom vika snabbkopplingarna framåt.

OBS! Läs noga igenom bruksanvisningen före användning och beakta alla instruktioner, framför allt säkerhetsanvisningarna.



Demontering/montering av framhjul

Hela framhjulsupphängningen är avtagbar för att underlätta transport.

1 Lossa framhjulsupphängningen genom att trycka in den svarta knappen under frontleden.

2 Ta av hela hjulupphängningen genom att lyfta ramens framände från

marken och samtidigt dra hjulupphängningen nedåt.

3 Vid montering av hjulupphängningen, lyft Velopedens framände, tryck in den svarta knappen och skjut in hjulaxeln i axelhålet. Släpp tryckknappen.





Demontering/montering av bakhjul

Bakhjulen är avtagbara för att ytterligare underlätta transport.

1 För att ta av hjulet, tryck in den svarta knappen i hjulets centrum och dra sen av hjulet.

2 Vid montering av hjulet, tryck in den svarta knappen i hjulets centrum och skjut in hjulaxeln i axelhålet. Släpp knappen då hjulet är i sitt ändläge.

3 Kontrollera att hjulet sitter fast ordentligt genom att ta tag i däcket och vicka hjulet fram och tillbaka i sidled.

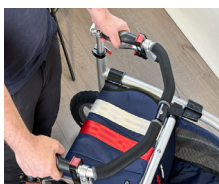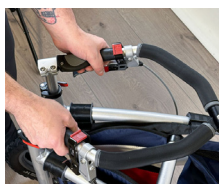

Körklart läge

1 Fäll ut Velopeden genom att vika isär de båda ramhalvorna.

2 Kontrollera att Velopeden låser i körklart läge, lyssna efter klickljudet då teleskopstaket låses i utfällt läge.

3 Sitsen är skjutbar i längsled. Skjut fram den för mer gångutrymme. Dra den bakåt vid sittande, för åtkomst av korg samt vid hopfällning.