




Veloped Käpphållare – Monteringsanvisning

2-delad käpphållare till Veloped som även fungerar som säkerhetsrem när Veloped fälls ihop för transport eller förvaring. Käpphållaren passar alla Veloped-modeller.

Skanna QR-koden med din smart telefon eller enhet för att se videoinstruktioner.

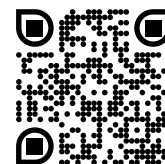

① Fäst den bakre hållaren.

Linda den bakre hållaren runt den övre delen av det bakre vertikala ramröret, precis nedanför snabblåset för höjdjustering.



② Dra åt remmen.

Linda remmen runt röret och fäst den med kardborrebandet. Låt remmens överdrivna längd hänga fritt.



③ Justera den bakre öglan.

Storleken på den bakre öglan kan justeras genom att lossa kardborrespännet. Du kan behöva klämma ihop öglan försiktigt för att få en rundad/cirkulär form.



④ Fäst den främre hållaren.

Linda den främre hållaren runt det övre ramröret, precis bakom korgskenan. Se till att halkskyddet är vänt mot ramröret.



⑤ Justera den främre öglan.

Storleken på den främre öglan kan justeras genom att lossa kardborrebandet. Du kan behöva klämma ihop öglan försiktigt för att få en rundad/cirkulär form.



⑥ Fäst kappen.

Fäst kappen genom att trycka in den bakifrån, först genom det bakre fästet och sedan genom den främre hållaren.



⑦ Säkra ramen.

Du kan använda kapphållarremmen för att säkra ramen när den är hopfälld, när du transporterar eller förvarar din Veloped.