



Manual: Trionic-vajerlås



① Titel1

Lokalisera skruven på fästet.



② Titel2



③ Skruva loss skruven med en 4 mm
insexnyckel.

Dra ut änden av remmen ur fästet.



④ Linda remmen runt Velopedets bakre
vertikala ramrör (på Walker, det halvvertikala
ramröret).



⑤ Sätt in änden av remmen i fästet.



⑥ Dra åt skruven/remmen med 4 mm insexnyckeln tills remmen sitter hårt.



⑦ Klipp av den överflödiga längden på remmen med en kabelavbitare eller kniv.



⑧ Bilden visar korrekt montering av fästet.



⑨ Fäst kabellåset på fästet uppifrån, tryck kabellåset nedåt tills det klickar i fästet.



⑩ För att lossa kabellåset från fästet, tryck på de två grå knapparna och ta bort låset från fästet.