



Veloped Transport Bag User Guide

Veloped-transportväskan innehåller en huvudväska för Veloped-ramen och två mindre väskor för fram- och bakhjulen. Transportväskan passar alla Veloped-modeller.

Transportväskan passar alla Veloped- modeller.



① Öppna huvudväskan.

Öppna förvaringsväskan (som också fungerar som framhjulsväska) och packa upp huvudtransportväskan och bakhjulsväskan.




② Packa ned framhjulen.

Montera av det främre klätterhjulet från Veloped-ramen och packa det i den större hjulväskan och stäng dragkedjan.




③ Packa ned bakhjulen.

Montera av de två bakhjulen från Veloped-ramen och packa dem i den mindre hjulväskan och stäng dragkedjan.

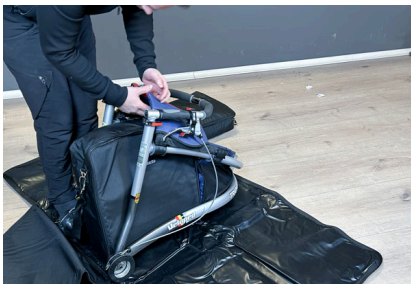

④ Läggt ut huvudväskan.

Öppna transportväskans dragkedja längs hela dess längd och vik ut väskans flikar på golvet. Placera Veloped-ramen på mittdelen av huvudväskan och placera den större framhjulsväskan under sitsen på Velopeden (mellan de två bakre vertikala ramrören).

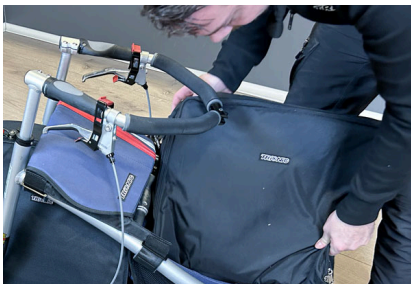

⑤ Läggt dit hjulväskorna.

Lösna snabbkopplingarna för höjdjusteringen och höj greppbågen lite, placera den mindre bakhjulsväskan ovanpå Veloped-korgen och justera sedan greppbågen till sitt nedersta läge.

⑥ Stängt väskan.

Dra flikarna på huvudväskan över Velopeden och stäng dragkedjan.

⑦ Detta fotot visar Velopeden som korrekt packad.

Packinstruktioner

Skanna QR-koden med din smart telefon eller enhet för att se videoinstruktioner.