



Walker käpphållare – monteringsanvisning

2-delad käpphållare som fästs på handtaget och ramen på Walkern. Den övre delen har en smart snabblåsfunktion, och kappen kan snabbt fästas och tas bort. Passar rollatorerna Walker 9er, 12er och 14er.

Skanna QR-koden med din smart telefon eller enhet för att se videoinstruktioner.



- ① Vrid den övre hållaren så att logotypen är vänd uppåt.



- ② Snäpp fast hållaren på den övre delen av handgreppsröret.

Snäpp fast hållaren på den övre delen av handgreppsröret och skruva sedan fast den med en stjärnskruvmejsel.



- ③ Om du fäster både käpphållaren och ryggstödet

Obs: Justera bromshandtagets position så att det finns plats för den övre käpphållaren bredvid ryggstödet. Det kan vara nödvändigt att luta käpphållaren utåt, cirka 30 grader, för att passa käpphållaren och ryggstödet på Walkern.




④ Fäst den nedre hållaren på ramen

För montering på höger/vänster sida, vrid den nedre hållaren så att du kan nå skruven från utsidan av ramen. För att fästa den nedre hållaren på ramen, linda remmen runt ramröret och tryck in den i hållarens hål.



⑤ Dra åt skruven/remmen

Dra åt skruven/remmen med en 4 mm insexnyckel.

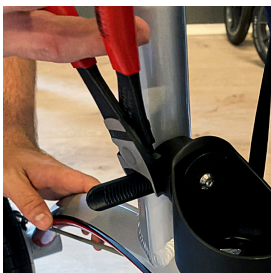

⑥ Klipp av den överdrivna längden på remmen

Klipp av den överflödiga längden på remmen med en kabelavbitare.



⑦ Färdig för användning