



Trionic Walker ryggstöd – monteringsanvisning



Det ergonomiska och polstrade ryggstödet, i vatten- avvisande och tålig 600D polyester, passar rollatorerna Walker 9er, 12er och 14er. Erbjuder ett komfortabelt och säkert stöd när du sitter på rollatorn.

Ryggstödet längd/djup är inställningsbar.

① Skruva bort.

Montera bort skruvarna och muttrarna från de båda klammorna.

② Fäst ryggstödet.

Öppna klammorna lite och fäst dem runt de båda grepprören.
OBS: Viktigt att loggan "TRiONiC" är rättvänd, eftersom ryggstödet är vinklat.



③ Hela vägen upp.

Skjut de båda klammorna till toppen av grepprören. Du kan behöva lossa skruven på bromshandtaget för att flytta det lite bakåt.





④ Fäst ryggstödet.

Med en 4 mm insexnyckel, fäst klammorna med skruvarna och muttrarna. Ryggstödet ska vid klamman peka framåt.

⑤ Fotot visar korrekt montering.



Inför utfällning av rollatorn.

För att fälla ihop rollatorn, vinkla först ryggstödet uppåt.

Vid behov.

Om du tycker att ryggstödet är för kort/för långt, kan du justera längden. Lossa de båda skruvarna och muttrarna, och montera sedan ihop ryggstödet igen.

