



Manual: Byte av Trionic Walker ryggsstödsrem



① Skruva loss skruven som håller fast remmen med en 3 mm insexnyckel.

Upprepa på motsatt sida.



② Se till att du tar tillbaka skruven, muttern och den rörformade distansen.





Manual: Byte av Trionic Walker ryggstödsrem



⑤ Sätt i det nya ersättningsremmen i vadderingen.

VIKTIGT: Se till att änden av remmen är i linje med TRIONIC-logotypen som visas på bilden.



⑥ Sätt i den rörformade distansbrickan i hålet i änden av remmen.

