




Walker transportväska – Packinstruktioner


Walker-transportväskan består av en huvudtransportväska och en mindre förvarings-/bärväska. Transportväskan passar alla Walker -modeller.

Transportväskan passar alla Trionic Walker-modeller.

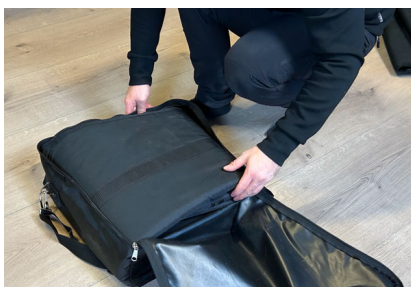


① Öppna huvudväskan

Öppna förvaringsväskan och packa upp huvudtransportväskan.

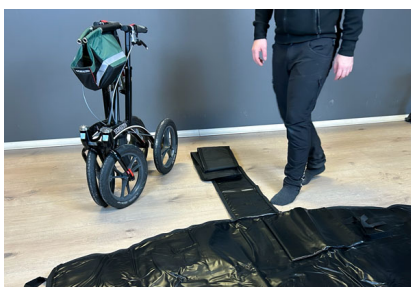

② Lägg ut huvudväskan.

Öppna transportväskans dragkedja längs hela dess längd och vik ut väskans flikar på golvet.

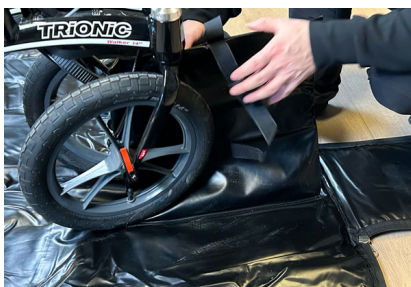


③ Placera rollatorn på väskan.

Placera Walkern på mittdelen av huvudtransportväskan. Huvudväskan har en integrerad vadderad skyddsflik med ett kardborreband. Dra den vadderade skyddsfliken uppåt och placera den mellan framhjulsgafflarna för att skydda lacken.



- ④ Säkra den hopfällda ramen med det integrerade kardborrebandet.

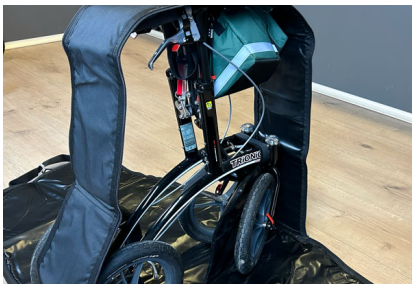

- ⑤ Vik transportväskans mittflik över Walkern.

- ⑥ Lyft sidoflikarna och stäng huvuddragkedjan.

- ⑦ Detta fotot visar Walkern som korrekt packad.

Packinstruktioner

Skanna QR-koden med din smart telefon eller enhet för att se videoinstruktioner.